

器具器械 12 理学診療用器具

除細動器

「半自動除細動器 カルジオライフ AED-9100シリーズ」の付属品 電 極


再使用禁止

禁忌・禁止

- 本電極は一回限り使用のディスポーザブル品です。再使用しないでください。

形状・構造等

本品は、カルディアック・サイエンス社製の半自動除細動器 カルジオライフ AED-9100シリーズ専用のディスポーザブル電極です。患者に装着する電極部のゲルが乾燥しないように、一つずつ密閉パッケージに収容されています。

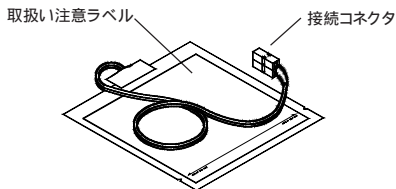

組成・成分一覧

名 称	成 分
パッド	ポリエチレン、アクリル粘着剤
ゲル*	導電性ハイドロゲル ポリアクリルアミド 40% グリセリン 35% 水 20% 塩化カリウム 5%
導電性金属部*	スズ

*:患者の胸部に接する部分

シンボルマーク一覧

本品には以下のシンボルマークが使用されています。シンボルマークが示す名称および意味は、下表の通りです。

シンボルマーク	名称・意味	シンボルマーク	名称・意味
ⓧ	再使用不可	☒	ラテックスフリー
🕒	使用期限	📦	開封位置
🌡️	保管温度範囲		

性能・使用目的

使用目的

本電極は、AED-9100シリーズに接続した状態で患者の胸部に装着することにより、AED-9100シリーズから送られてくる除細動エネルギーを患者に通電します。また同時に、除細動の是非を解析するための心電図導出電極としても使用します。

操作方法または使用方法等(用法・用量を含む)


装置に電極を取り付ける

1. 新しい電極を用意します。


(注) 新しい電極のラベルに表示されている使用期限をチェックし、適切な期限であることを確認してください。

2. AED-9100シリーズのカバーを開けます。

3. 電極の接続コネクタの色とAED-9100シリーズのコネクタ部の色を合わせながら、AED-9100シリーズケースのくぼみに沿って滑らせながら接続します。

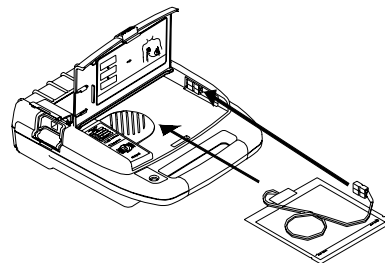

4. 電極をAED-9100シリーズの保管場所にしまします。ケーブルの余った部分は、図に示すようにループにしておきます。

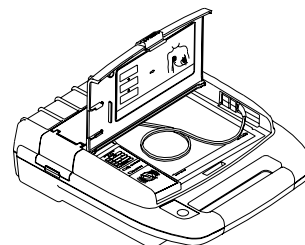


5. 電極の包装に貼ってある使用期限のシール1枚(上側)を剥がし、装置外周のよく見える位置に貼ります。

(注) 緊急時の使用に対応できるよう、電極は常に取り付けられた状態を維持してください。


電極の装着方法

1. AED-9100シリーズに接続した状態で、図に示す位置でパッケージを破り、電極を取り出します。


(注) パッケージは電極のケーブルに付けたままにしておきます。

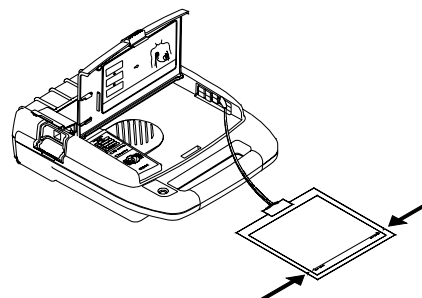

- 患者の上半身の衣服を脱がせ、胸部の皮膚が清潔で、乾いていて、油がない状態にします。
- 均等に強く引っ張りながら、片側の電極を剥離紙からていねいに剥がします。

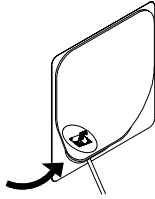

- 電極の最上部が鎖骨上になるように、接着面を患者の皮膚に貼り付けます。
(注)電極を胸骨の上には貼付しないでください。
- 同様にもう一方の電極を剥離紙から剥がし、図に示すように、患者の左下胸部に貼り付けます。

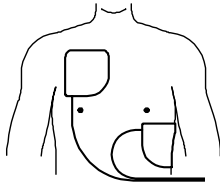

- 以降は、AED-9100シリーズの音声指示に従って救命処置を実施します。
(注)電極をチェックしてください」という音声指示が聞こえたら、以下のことを確認してください。
 - ・清潔で湿っていない皮膚に電極がしっかり貼られているか
 - ・電極のケーブルがAED-9100シリーズ本体にしっかり接続されているか

廃棄

- 処置を終えたら、患者の胸部から電極を剥がし、装置本体から接続コネクタをはずします。
- 電極をパッケージ内に収めた状態で廃棄します。
(注)使用済みの電極は、医療用廃棄物として専門業者に依頼して廃棄処理してください。

使用上の注意

重要な基本的注意

- 電極のパッケージに記載されている使用期限を過ぎた電極は、使用しないでください。
- 電極を装置本体に取り付けた状態での保管は、極端に温度が高い場合、通常の電極に比べ保管寿命が低下することがあります。
- 電極の動作温度は、パッケージに記載されている範囲を守ってください。(温度範囲 0～50)
- 使用直前まで開封しないでください。
- パッケージが破れている電極および開封後日数が経過している電極は使用しないでください。

貯蔵・保管方法および使用期間等

使用(待機)環境条件

温度範囲 0～50
 湿度範囲 5～95%(結露なきこと)
 気圧範囲 57～170 kPa

保存環境条件

温度範囲 0～50
 湿度範囲 5～95%(結露なきこと)
 気圧範囲 57～170 kPa

使用期限

製造から2年(製造元の自己認証による)

包装単位

1個/1梱包

製造元 **カルディアック・サイエンス・インク**
 アメリカ合衆国 92606 カルフォルニア州 アーバインミリカンアベニュー16931

国内管理人 輸入販売元 **日本光電** 日本光電工業株式会社
 東京都新宿区西落合1-31-4 〒161-8560
 ☎(03)5996-8000(代表) Fax(03)5996-8091

緊急連絡先 **日本光電 コールセンタ**
 TEL(0120)49-0990