

医療用品(4) 整形用品

一般医療機器 X線造影剤入りガーゼ 32374000

# QuikClot カオリンX

## 再使用禁止

### 禁忌・禁止

#### 1. 使用方法

- (1) 本品の使用は1回限りとし、再使用、再滅菌しないでください。
- (2) 本品を体内に留置しないでください。[留置した場合の安全性・有効性は確認されていません。]

### 【形状・構造及び原理等】


#### 1. 概要

本品は、出血の抑制、液の吸収のため皮膚創傷部に用います。X線を検知できる成分を用いています。本品はディスポーザブル製品です。

#### 2. 構成および形状

本品は以下の種類があります。

##### \* (1) QuikClot 4x4

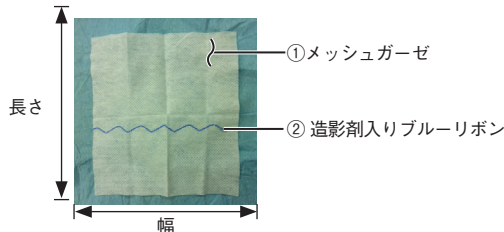

名称	型式	幅	長さ
* QuikClot 4x4	QC-ED	200mm ±10%	200mm ±10%

#### 3. 動作原理

本品を直接創傷部に適応して、メッシュガーゼが血液を吸収することにより、出血の抑制に寄与します。本品に付着するブルーリボンには造影剤成分を含有するため、X線透過装置を用いて本品の位置を特定できます。

#### 4. 主な原材料

番号	名称	原材料
①	メッシュガーゼ	レーヨン
		ポリエステル
		グリセリン
		カオリン
②	造影剤入りブルーリボン	バリウム
		ポリプロピレン

### 【使用目的又は効果】

#### 1. 使用目的

出血の抑制、液の吸収、擦過傷のため、皮膚創傷に用います。

### 【使用方法等】

#### 1. 使用方法


##### (1) 使用前に

- 1) 医療用手袋とマスクを装着します。

0654-904133D

#### (2) 使用方法

- 1) 滅菌包装を開封し、本品を取り出します。
- 2) 本品を創傷部の上から強く圧迫します。出血量が多い場合には、複数枚を重ねて使用します。止血するまで用手圧迫を続けます(3分間以上)。
- 3) 圧迫を維持するために包帯で覆います。
- 4) 本品を24時間以内に取り外します。取り外す際は、本品をゆっくりと外します。

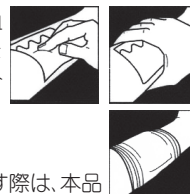

#### 2. 使用方法等に関連する使用上の注意

##### (1) 全般的な注意事項

- 1) 本品は開封後直ちに使用してください。
- 2) 皮膚が過敏または異常な患者に使用した場合には、発赤、腫脹の恐れがあります。
- 3) 本品にはわずかな芳香がありますが、問題はありません。

##### (2) 使用中の注意事項

- 1) 本品を吸入しないでください。肺炎を引き起こす可能性があります。
- 2) 本品を眼の周囲に適用する場合は、本品が眼に入らないように注意してください。万一、眼に入った場合は十分な量の水で洗い流す等適切な処置を講じてください。眼の不快感もしくは炎症を引き起こす可能性があります。
- 3) 本品を口腔内等に適用する際には、本品を飲み込まないように注意してください。胃腸管の炎症を引き起こす可能性があります。大量の場合は、肝臓に障害をもたらす可能性があります。
- 4) 本品使用中に皮膚障害と思われる症状が現れた場合には、ただちに使用を中止し、適切な治療を行ってください。

##### (3) 使用後の注意事項

- 1) 本品使用後は、本品の接触部や患者の状態に異常がないことを確認してください。
- 2) カオリンが大量に傷口に残存している場合には、洗浄してください。

##### (4) 保管に関する注意事項

- 1) 本品は、火気のおそれのない場所で保管してください。
- 2) 本品は、高温多湿を避け、-20℃以上、+54℃以下で保管してください。

### 【使用上の注意】

#### 1. 重要な基本的注意

- (1) 使用後は、医療廃棄物として処理してください。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 日本光電工業株式会社

電話番号： 03-5996-8000(代表)

外国製造業者： Z-Medica,LLC (アメリカ合衆国)

# 日本光電

## 日本光電工業株式会社

東京都新宿区西落合1-31-4 〒161-8560

☎(03)5996-8000(代表) Fax. (03)5996-8091

<http://www.nihonkohden.co.jp/>