


※詳細は添付文書/取扱説明書をご参照の上、適切にご使用ください

【各部名称】

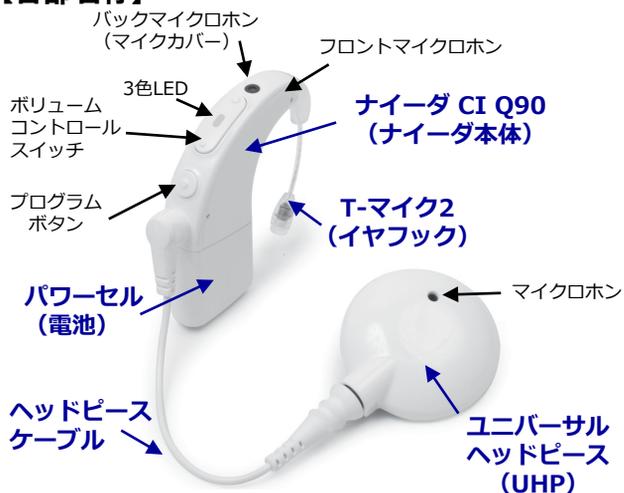

【電源のON/OFF】

電池を取り付けると電源が入り、外すと切れます。
電源が入るとLEDが光ります。



【LED】

LEDの色や点滅でプロセッサの状態を確認できます。

LED・色	状況	対処法
起動時の点滅	点滅なし = 電池切れ 4回点滅 = フル充電 ※電池残量によって4→1回と点滅回数が減ります	電源が入らない場合(点滅なし)は電池を交換してください
点灯★ ※つきっぱなし	電池残量ほとんどなし	電池を交換してください
3秒に2回点滅★	電池残量ほとんどなし ※音が聞こえなくなります	電池を交換してください
1秒に1回点滅★	インプラントとのロックが失われている (ヘッドピースが外れている、ケーブルが断線している、等) ※音が聞こえなくなります	ヘッドピースを頭に取り付けてください。 取りつけても改善しない場合、ヘッドピースまたはケーブルの不具合が考えられるので交換してください。
素早く点滅(1秒に1回以上)	間違ったインプラントに接続 ※音が聞こえなくなります	ご自身のプロセッサであること、左右が間違っていないことを確認してください。
点灯 ※つきっぱなし	エラー状態 電池を一度完全に取り外してからもう一度取り付けてください ※音が聞こえなくなります	電池を入れ直しても改善しない場合、プロセッサ本体の不具合の可能性があります。病院または弊社にご連絡ください。
大きな音にあわせてランプが点滅★	ナイーダサウンドプロセッサとマイクが音声に反応	問題ありません
点灯 ※つきっぱなし	プロセッサにプログラムが入っていない ※音が聞こえなくなります	病院でプログラムを書き込んでもらってください
起動時・プログラム変更時に点滅	点滅回数 = プログラム番号 ※1回点滅 = プログラム1に設定	問題ありません

★：病院での設定によってON/OFFができます。

【Roger/T-コイル】



Roger17受信機をパワーセル170 (電池)に取り付け、送信機とペアリングを行ってください。

T-コイルを使用する場合は、病院でT-コイル機能をONにしたプログラムを作成してもらい、使用時にプログラムを切り替えてください。

【アクアケース】

水泳や水遊び、砂遊び等の時にはアクアケースを使用してください。



★アクアケースの使い方★

- ①本体のプログラムボタンを押して、ヘッドピースマイクのプログラムに切り替えます。
- ②ロックをスライドさせた状態のまま指先でラッチを引いてケースを開けます
- ③ナイーダCIのケーブル接続部をアクアケースのケーブル接続部に合わせます



- ④ケースのふたを閉じ、ラッチを元の位置に戻します。
(ロックが自動的に閉まります)
アクアマイクケーブルとアクアマイクを取り付けます。



【リスニングチェック】

マイクロホンや音声入力源の音 (プログラムで設定されている音源)を確認できます。



リスニングチェックの「AB」のロゴ部分をつまんで引き抜き、90度回転させてはめ込みます

